



SWASH[®] PERINEUM GLOVES – PARFÜMFREI

ALLGEMEINE INFORMATION

Artikelnummer	C04070-8
Basic UDI-DI	871712793INCONTINENCENG
UDI-DI	08717127937172
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Für den Einsatz in der perinealen Pflege inkontinenter Patienten als Maßnahme zur Prävention von Hautschäden im Zusammenhang mit der Feuchtigkeitsaussetzung von Urin und Stuhl (IAD) oder als Maßnahme zur frühzeitigen Behandlung solcher Hautschäden (IAD) vorgesehen.
Paketinhalt	8 Waschhandschuhe
Kartoninhalt	40 Packungen
Hersteller	Arion Manufacturing B.V. – Niederlande Rutherford 11, 6422 RE Heerlen

INFORMATION PRODUKT

Produktart	Medizinprodukt Klasse 1 (Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745)
Zusammensetzung des Tuches	Polyester & Lyocell
Stoff-Art	Spunlace
Dicke des Tuches	ca. 82 GSM
Gewicht Karton	ca. 6.971 g
Netto Abfallgewicht Tuch	ca. 50 g
Netto Abfallgewicht Folie	ca. 5 g
pH-Wert	5 – 6
Größe Handschuh	22 cm x 15 cm
Dimensionen Paket	11 cm x 21,5 cm

INHALTSSTOFFE LOTION


FUNKTION

KONZENTRATION %

Aqua	Dient als Lösungsmittel, in dem die übrigen Inhaltsstoffe gelöst werden.	75-100
Dimethicone	Dieser Inhaltsstoff, der auch oft in Barriere-Cremen benutzt wird, hinterlässt einen schützenden Film auf der Haut. Zusätzlich reduziert die wasseranziehende Substanz das Austrocknen der Haut.	3
Propylene Glycol	Ein hydrophiler Stoff, der das Austrocknen der Haut reduziert. Dient ebenfalls als Lösungsmittel und begrenzt die Viskosität.	1-5
Laureth-4	Gewährleistet eine milde Reinigung der Haut und wirkt für das Dimethicone Öl als Emulgator.	1-5
Glycerin	Ein hydrophiler Stoff, der das Austrocknen der Haut reduziert.	1-5
Caprylyl Glycol	Ein Hautpflegender Bestandteil. Zusätzlich verlängert der Bestandteil die Haltbarkeit des Produkts, wie ein Konservierungsstoff.	0,1-1

Glyceryl Caprylate	Dient zum Befeuchten der Haut. Zusätzlich verlängert der Bestandteil die Haltbarkeit des Produkts, wie ein Konservierungsstoff.	0,1-1
Tocopherol (Vitamin E)	Verlängert die Haltbarkeit des Produkts, indem es die Oxidation an der Luft verhindert. Außerdem wird dieser Stoff als Feuchtigkeitsmittel eingesetzt, um Trockenheit von Haut und Haaren zu vermeiden.	0,1-1
Disodium Cocoamphodiacetate	Dieser milde, reinigende Bestandteil mit hautpflegenden Eigenschaften bewirkt die Vermischung des Schmutzes mit Wasser. Sorgt für Schaumbildung.	0,1-1
Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurat	Verdickungsmittel und sensorischer Modifikator	0,1-1
Potassium Sorbate	Natürliches Konservierungsmittel.	0,1-1
Zitronensäure	pH-Modifikator	0,1-1
Dipropylene Glycol	Lösungsmittel für das Konservierungssystem.	0,1-1

ANWENDUNG

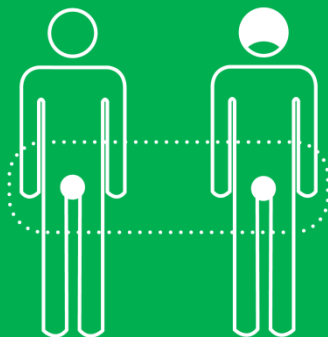

- Reinigen Sie den verschmutzten Dammbereich mit ausreichend vielen Waschhandschuhen und von vorne nach hinten.
- Sorgen Sie dafür, dass die Haut trocken ist vor dem neuen Anziehen der Inkontinenzmaterialien und/oder Unterwäsche.
- Falls erforderlich, die Swash®-Packung vor Gebrauch erwärmen.
- Die Temperatur der erwärmten Waschhandschuhe vor Gebrauch überprüfen.
- Die Packung ist personengebunden.
- Vermeiden Sie den Kontakt dieses Produktes mit Augen.
- Bei anhaltender Rötung und ernsthafter Hautverletzung bei dem Pflegebedürftigen (nicht irritierte, sondern ernsthaft offene Haut) muss ein Wundspezialist, Dermatologe oder ein Hausarzt konsultiert werden.
- Einwegprodukt.
- Nur zur externen Anwendung geeignet.
- Eine geöffnete Packung nur innerhalb 48 Stunden verwendbar.
- Entsorgen Sie die Waschhandschuhe nicht in der Toilette.

HAUTVERTRÄGLICHKEIT

Test auf Hautreizung

- Ergebnisse:
- keine Irritationen auf der Haut.
 - kein Ödem auf der Haut und keine Hautrötung während und nach dem Test.
 - keine Indikation, dass eine allergische Hautreaktion verursacht werden könnte.

Dermatest

Die Produkte werden durch Epikutantests unter der Kontrolle von Dermatologen und nach internationalen Richtlinien auf ihre Hautverträglichkeit geprüft. Es wurden keine relevanten Hautreaktionen im Testgebiet nach einer einmaligen Produkthanwendung festgestellt. Das Produkt wurde daher „ausgezeichnet“ vertragen und kann als „dermatologisch getestet“ deklariert werden.