


exeol surf optimal

Alkoholfreier Desinfektionsreiniger für Oberflächen und Medizinprodukte

Gebrauchsfertige Lösung:


- **Anwendung Medizinprodukt:** für die Reinigung und Desinfektion durch Abwischen der Oberflächen von wiederverwendbaren, invasiven und nicht-invasiven Medizinprodukten.
- **Anwendung Biozidprodukt:** für die Reinigung und Desinfektion durch Abwischen von Oberflächen, Möbeln und schweren Geräten.

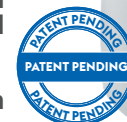


Vor jedem Gebrauch das auf dem Etikett angegebene Verwendbarkeitsdatum überprüfen.

⚠ **exeol surf optimal** ist für die unverdünnte Anwendung geeignet.


Spray 750ml

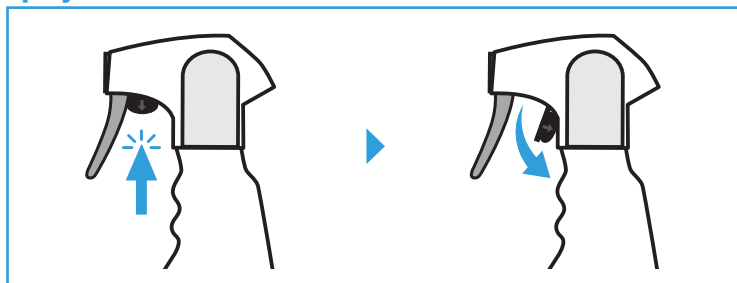


- 1** Bei der ersten Verwendung den Originalitätsring von der Düse entfernen. Den Sicherheitsverschluss des Sprays öffnen.

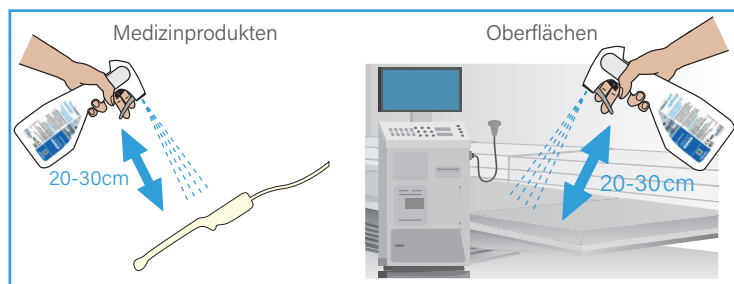


- 2** Gleichmäßig auf die Oberfläche sprühen, um den zu behandelnden Bereich gut abzudecken ($\pm 6 \text{ ml/m}^2$, in einem Abstand von 20 - 30cm von der Oberfläche).

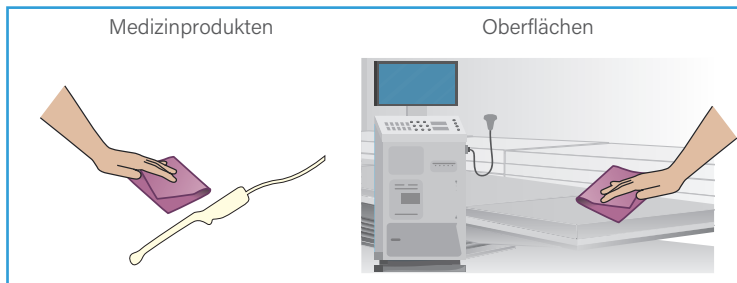

- 3** Oberfläche durch Abwischen reinigen.

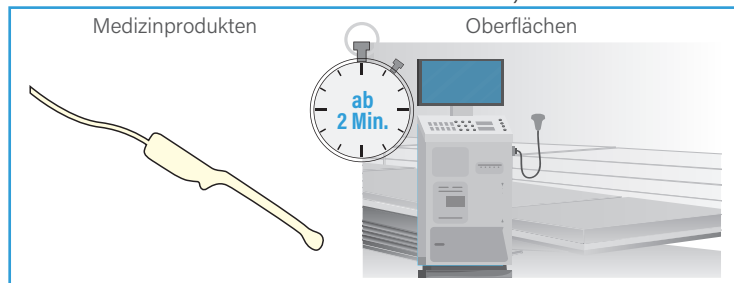


- 4** Kontaktzeit: ab 2 Min. je nach gewünschtem Wirkungsspektrum. Nach entsprechender Kontaktzeit trocknen lassen oder mit einem trockenen Wischtuch abwischen.

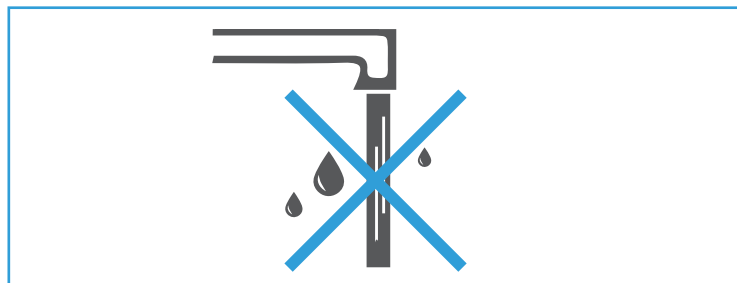

- 5** Nicht abspülen (außer Oberflächen, die direkt mit Schleimhäuten oder mit Lebensmitteln in Berührung kommen, oder wenn ein anschließender Desinfektionsschritt erforderlich ist).

Den Desinfektionsvorgang jeweils bei Bedarf wiederholen.

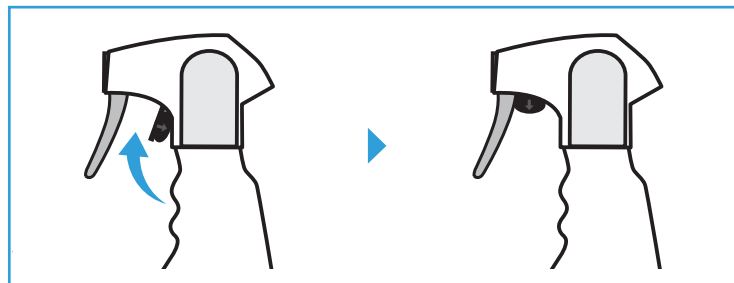

- 6** Nach der Anwendung den Sicherheitsverschluss verriegeln.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

IN FRANKREICH HERGESTELLT

SANTÉ
exeol
A SODEL DIVISION



Produktdossier verfügbar
unter www.exeol.fr

Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

CE-Kennzeichnung 2023 erhalten
MD Klasse IIa

