

VERIFY™ DualAction

Indicateur ultrasonique



DOUBLE ACTION
DOUBLE OBJECTIF

 **STERIS**

Simplifier, Rationaliser, VÉRIFIER

Le contrôle des performances des nettoyeurs/irrigateurs à ultrasons est essentiel pour vérifier le bon fonctionnement de l'équipement.

Deux indicateurs peuvent être utilisés pour surveiller les quatre paramètres de performances ultrasoniques :



Temps



Chimie



Température



Cavitation

Bien que deux tests distincts pour le contrôle soient une solution, cela oblige les techniciens à se souvenir des deux parties du test complet et implique souvent une interprétation du changement de couleur des flacons en verre qu'il peut être difficile de distinguer entre « réussite » et « échec ».



UN INDICATEUR – DEUX RÉSULTATS

Un **indicateur** unique en son genre qui rationalise la surveillance par ultrasons dans un seul produit, pour les 4 paramètres.

Le **dispositif d'épreuve de procédé en acier inoxydable** comprend une **conception en treillis** qui imite les zones difficiles d'accès sur les instruments comme les articulations de verrouillage des boîtiers, et est conçu pour résister à la corrosion afin de supporter des tests répétés.



Interprétation facile de la réussite/ de l'échec

L'indicateur sera réussi si :

- Toutes les souillures synthétiques rouges sont éliminées
- La bandelette d'aluminium est cassée



NON EXPOSÉ




EXPOSÉ - RÉUSSITE

Test de cavitation dédié

La bandelette en aluminium reproduit les tests de qualification de cavitation pour les nettoyeurs à ultrasons lors de l'installation.

TEST TOTAL DU RÉSERVOIR

La **surveillance de zone** permet de surveiller diverses zones dans le réservoir d'ultrasons pour garantir une couverture complète.

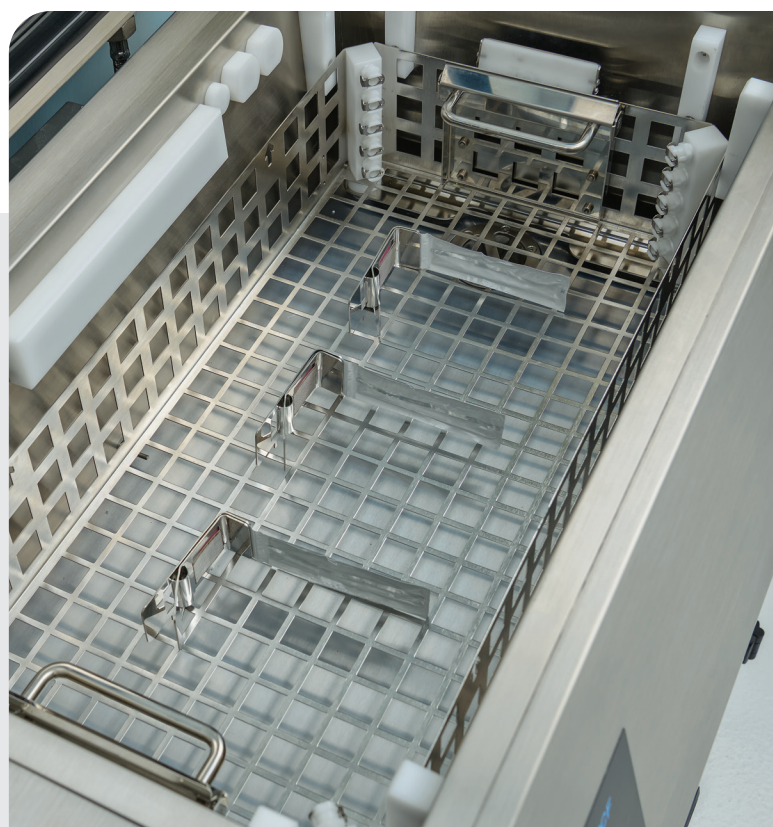

CONTRIBUE À MAINTENIR LA CONFORMITÉ ET L'ASSURANCE QUALITÉ

Traçabilité de la charge avec des numéros de lot de bandelettes individuels pouvant être associés à chaque charge.

AAMI ST 79, Section 7.6.4.5 Vérification du processus de nettoyage, « Les performances de l'équipement de nettoyage mécanique doivent être testées chaque jour d'utilisation et tous les résultats doivent être consignés. »

CONÇU POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER

Formulé avec des souillures d'essai synthétiques pour imiter le sang et les souillures chirurgicales courantes, ce qui permet une manipulation sans danger.



Peut être jeté dans une poubelle traditionnelle



IRRIGATEURS À ULTRASONS INNOWAVE™

Cette gamme complète de nettoyeurs à ultrasons et d'irrigateurs soniques offre une efficacité accrue et un rendement optimal grâce à des capacités de poids importantes et de courtes durées de cycle.



Conforme aux normes industrielles
notamment ANSI/AAMI ST 15883-2:2013
4.3 et A0 3000



Conservez des niveaux de température adaptés pour assurer la cavitation et le rendement enzymatique



L'enregistrement des données est facilité
par les options de données intégrées pour la durée, la température, la cavitation et les substances chimiques



Le couvercle de verrouillage automatique offre une garantie de sécurité accrue*

INDICATEUR ULTRASONIQUE VERIFY DualAction

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
LCC027	Indicateur ultrasonique VERIFY DualAction	100 indicateurs/boîte
LCC028	Support pour indicateur ultrasonique VERIFY DualAction	1 support par boîte

* Applicable à des unités spécifiques.

CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT STERIS
pour plus d'informations.