

SWASH® SHAMPOO CAP – AVEC PAUM - ORANGE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Numéro d'article	G04077-1
Basic UDI-DI	871712793HAIR.CARECB
UDI-DI	08717127937929
Usage prévu	Destiné à un lavage complet des cheveux des patients alités comme mesure de prévention des infections.
Contenu du paquet	1 cap
Contenu du carton	52 paquets
Fabricant	Arion Manufacturing B.V. – Les Pays-Bas Rutherford 11, 6422 RE Heerlen

INFORMATIONS PRODUIT

Type de produit	Dispositif médical de classe 1 (2017/745/CE)
Composition du tissu	Polyester & Lyocell
Méthode de production du tissu	Needle punch
Poids du carton	ca. 6.823 gram
Poids net du cap	ca. 30 gram
Poids net du film protecteur	ca. 4 gram
Valeur du pH	5 – 6
Dimensions du cap	30 cm x 30 cm
Dimension du paquet	22 cm x 12 cm

INGRÉDIENTS DU LOTION

FONCTION

(%)

Aqua	Agit comme solvant où tous les ingrédients sont dilués.	75-100
Disodium Cocoamphodiacetate	Tensioactif doux	1-5
Propanediol	Solvant naturel et agent hydratant	1-5
Glycérine	Agent hydratant	1-5
Capryloyl/Caproyl Anhydro Methyl Glucamide	Solubilisant pour le parfum, amplificateur de conservateur.	1-5
Caprylyl Glycol	Conditionneur pour la peau. A aussi des propriétés de conservation.	0. 1-1
Glyceryl Caprylate	Composant hydratant. A aussi des propriétés de conservation.	0,1-1
Olivate d'éthylhexyle hydrogéné	Tensioactif et après-shampooing pour cheveux	0. 1-1
Olive hydrogénée non saponifiable	Agent hydratant et conditionneur, réduit la formation de mousse.	0. 1-1
Potassium Sorbate	Moyen de conservation naturel qui prolonge la durée de vie du produit.	0. 1-1
Dipropylène glycol	Solvant pour le système de conservation	0.1-1
Acide citrique	Modificateur de pH	0.1-1
Parfum	Ingrédient de parfum	<0.1

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



Si désiré, chauffer le Swash[®] Shampoo Cap avant utilisation (800 Watt, 20 secondes).

Vérifiez la température du Swash[®] Shampoo Cap chauffé avant utilisation.

Mettez le Swash[®] Shampoo Cap sur la tête du patient et mettez tous les cheveux en dessous.

Masser les cheveux pendant 2 à 3 minutes.

Retirez le Swash[®] Shampoo Cap de la tête du patient (ne rincez pas la lotion).

Sécher soigneusement les cheveux avec une serviette.

Usage unique. Ne pas réchauffer.

Ne pas jeter dans les toilettes.

RÉSULTATS DES TESTS

Test d'irritation oculaire

Les résultats montrent que le Swash[®] Shampoo Cap ne cause pas d'irritation à la cornée ni à l'iris. De plus, aucune rougeur ou gonflement de la muqueuse n'a été observé.

Test d'irritation cutanée

Les résultats montrent que le Swash[®] Shampoo Cap ne cause pas d'irritation cutanée. Il n'y avait aucun signe d'œdème ou de rougeur de la peau pendant ou après le test.