

SWASH[®] ANTISEPTIC CAP – SANS PARFUM

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Numéro d'article	HI 4077-I
Contenu du paquet	1 Antiseptic cap, 1 protection des yeux et des oreilles
Contenu du carton	42 paquettes
Fabricant	Arion Manufacturing B.V. – Les Pays-Bas

INFORMATIONS PRODUIT

Type de produit	BPR, UE (n° 528/2012)
Numéro d'enregistrement	
Composition du tissu	Polyester & Lyocell
Composition du film	PET & PE (plus épais que le film standard Swash car le CHG pourrait se dégrader sous l'influence de la lumière UV)
Méthode de production	Needle punch
Poids du carton	ca. 7696 gram
Poids net du tissu	ca. 30 gram
Poids net du film protecteur	ca. 4 gram
Valeur du PH	5 – 6
Dimension	Ø 30 cm
Dimension du paquet	22 cm x 12 cm

INGRÉDIENTS DU LOTION

FONCTION

		%
Aqua	Agit comme solvant où tout les ingrédients sont dilués.	75-100
Digluconate de Chlorhexidine	Molécule chargée positivement, appliquée comme agent antimicrobien très efficace contre les bactéries et les levures.	1-5
Propylène Glycol	Ingrédient hydratant, qui réduit l'assèchement de la peau. Agit aussi comme solvant et détermine la viscosité.	1-5
Glycérine	Crème hydratante, pour prévenir la déshydratation de la peau. Egalement un solvant qui est beaucoup utilisé dans les produits cosmétiques comme les shampoings.	1-5
Polysorbate 20	Émulsifiant qui garantit que les substances non miscibles peuvent encore former un mélange homogène et stable. Fonctionne également comme nettoyant doux.	0.1-1
Tocopherol (Vitamin E)	Antioxydant et hydratant pour prévenir le dessèchement de la peau.	0.1-1
L'acide sorbique	Moyen de conservation naturel, utilisé pour amener le pH du lotion à le niveau de la peau	< 0.1
Sorbate de Potassium	Moyen de conservation naturel qui prolonge la durée de vie du produit.	< 0.1
Chlorure de Benzalkonium	Moyen de conservation synthétique, qui prolonge la durée de vie du produit et qui augment l'effet antimicrobien du chlorhexidine digluconat.	< 0.1

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



Lire la notice et le protocole avant utilisation.

Chauffage au micro-ondes à maximum 15 secondes (800 Watt). Vérifiez la température avant utilisation. Remarque: les gants jetables réduisent votre sensibilité à la chaleur.

Placez la protection des yeux et des oreilles sur la tête avec le côté rouge vers le bas, au-dessus des oreilles et des sourcils. Assurez-vous que tous les poils se trouvent au-dessus de la protection.

Appliquez le capuchon Swash® Antiseptic Cap sur la tête et assurez-vous que tous les cheveux soient couverts.

Déplacez le capuchon Swash® Antiseptic Cap sur la tête pendant 2 à 3 minutes jusqu'à ce que les cheveux soient saturés de lotion.

Enlevez le capuchon et séchez les cheveux.

Enlevez la protection oculaire et auditive et coiffez comme d'habitude.

Ne pas rincer ou laver les cheveux pendant 24 heures après utilisation.

Utilisez uniquement le Swash® Antiseptic Cap pour un effet antibactérien durable.

EFFICACITÉ CONTRE PLUSIEURS AGENTS PATHOGÈNES

Bactéricide (Gram positif)
DIN EN 13727:2015-1

- *Staphylococcus aureus*
- *Enterococcus hirae*
- *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline (SARM)
- *Enterococcus faecium* ERV

Bactéricide (Gram négatif)
DIN EN 13727:2015-12

- *Escherichia coli*
- *Klebsiella pneumoniae* BLSE
- *Pseudomonas aeruginosa*

Levuricide
DIN EN 13624:2022-08
EN 1500:1300 + EC1-2013

- *Candida albicans*
- *Candida auris*
- *Escherichia coli*

Décolonisation de la peau

- *Staphylococcus aureus* (MSSA)

VAH methode 13:2022
grampositif

- *Staphylococcus aureus*
- *Enterococcus hirae*
- *Escherichia coli* K12
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Candida albicans*

gramnégatif

levuricide