

exeol surf control

Détergent désinfectant des surfaces sans alcool

- Solution prête à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces, du mobilier, des équipements lourds et des surfaces des dispositifs médicaux dans le cadre de la maîtrise des risques microbiologiques liés à l'environnement.



En tant que désinfectant de surfaces relevant du statut de produit biocide, **exeol surf control** est, selon l'Agence française de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), adapté pour la désinfection des surfaces des Dispositifs Médicaux dans le cadre de la maîtrise des risques microbiologiques liés à l'environnement. Exemples : stéthoscope, table d'opération, fauteuil roulant, moniteur, câble et connectique, tensiomètre, marteau à réflexe...




SURFACES

Avant toute utilisation, vérifier la date de péremption figurant sur l'étiquette.

⚠ **exeol surf control** s'utilise non dilué. Respecter le plan d'hygiène de l'établissement.


Le bidon de 5L est conçu pour une utilisation en pulvérisateur à pression préalable. Il n'est pas conçu pour recharger d'autres flacons.

Bidon 5L

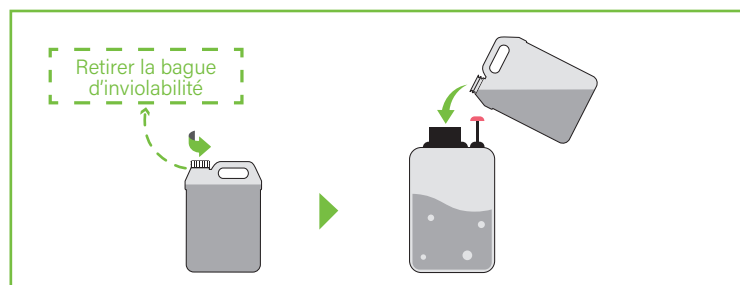


- 1** Lors de la première utilisation, retirer la bague d'invulnérabilité puis dévisser le bouchon.


Dévisser le bouchon du bidon et transvaser le contenu dans le pulvérisateur avant la mise sous pression. Refermer le bouchon du bidon.

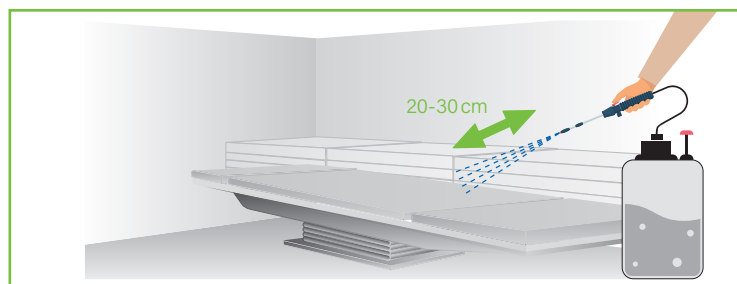

- 2** Pulvériser uniformément sur la surface de manière à bien couvrir la zone à traiter ($\pm 6\text{mL/m}^2$, à 20-30 cm de la surface).

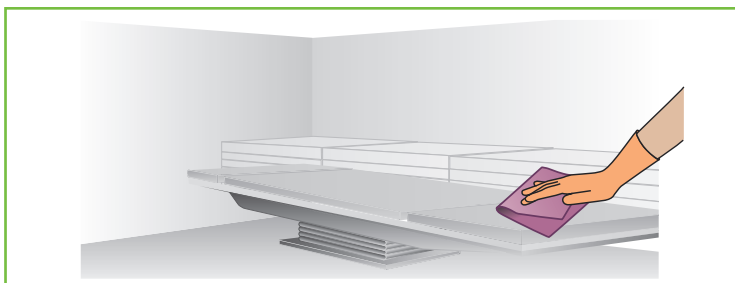

- 3** Nettoyer la surface par essuyage.

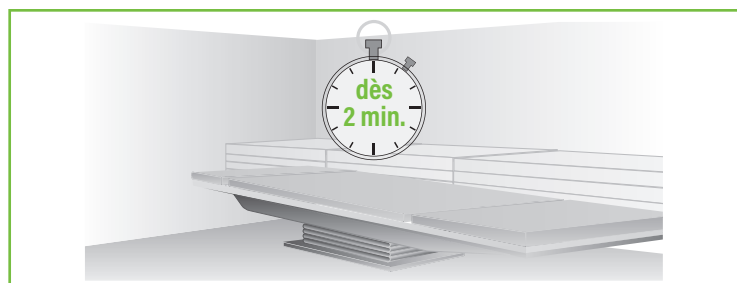

- 4** Temps de contact : dès 2 min. selon le spectre d'activité recherché. Après le temps de contact approprié, laisser sécher ou essuyer avec une lingette sèche.



- 5** Ne pas rincer (*excepté les surfaces en contact direct avec la peau, ou les denrées alimentaires).

Répéter l'opération de désinfection chaque fois que nécessaire.

Utilisez les produits biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANTÉ
exeol
UNE DIVISION SODEL



Dossier produit disponible sur www.exeol.fr



Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr