

SWASH[®] PERINEUM⁺ WIPES – SANS PARFUM

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Numéro d'article	Ko4540-8
Basic UDI-DI	871712793INCONTINENCENG
UDI-DI	08717127938186
Usage prévu	Destiné aux soins périnéaux des patients incontinents comme mesure de prévention des lésions cutanées associées à l'exposition à l'urine ou aux selles (IAD) ou comme mesure de prise en charge de ces lésions cutanées (IAD) à un stade précoce.
Contenu du paquet	8 lingettes
Contenu du carton	40 paquets
Fabricant	Arion Manufacturing B.V. – Les Pays-Bas Rutherford 11, 6422 RE Heerlen
Date d'émission	03/2021
Date de révision	08/2022
Version	V2

INFORMATIONS PRODUIT

Type de produit	Dispositif médical de classe 1 (2017/745/CE)
Composition du tissu	Polyester & Lyocell
Méthode de production	Spunlace
Poids de norme du tissu	ca. 82 GSM
Poids du carton	ca. 10.000 g
Poids net du tissu	ca. 35 g
Poids net du film protecteur	ca. 5 g
Valeur du pH	5 - 6
Dimension du gant	20 cm x 25 cm
Dimension du paquet	10,5 cm x 25,5 cm


INGRÉDIENTS LOTION

FONCTION

		%
Aqua	Sert comme solvant où tous les ingrédients sont dilués.	75-100
Diméthicone	Cet ingrédient qui est aussi souvent utilisé dans les crèmes barrières laisse une couche protectrice sur la peau. De plus une matière hydrophile qui réduit la déshydratation de la peau.	3
Propylene Glycol	Ingrédient hydratant, qui réduit la déshydratation de la peau. Agit aussi comme solvant et détermine la viscosité.	1-5
Magnesium Aluminum Silicate	Smectite naturelle qui aide à stabiliser l'huile dans l'émulsion d'eau.	1-5
Glycérine	Crème hydratante, pour prévenir la déshydratation de la peau. Egalement un solvant qui est beaucoup utilisé dans les produits cosmétiques comme les shampooings.	1-5
Caprylic / Capric Triglyceride	Les acides gras d'origine naturelle qui fonctionnent comme émollients (ingrédients qui adoucissent la peau).	0.1-1

Lauryl Glucoside	D'origine végétale, très doux ingrédient de nettoyage de la peau	0,1-1
Sodium Lauroyl Lactylate	Émulsifiant doux naturel qui aide à créer l'émulsion huile dans l'eau.	0,1-1
Polyacrylate Crosspolymer-11	Hydrogel d'agent épaississant pour des émulsions huile-dans-eau.	0,1-1
Glyceryl Stearate	Émulsionner la cire qui agit comme un lubrifiant de la peau.	0,1-1
Caprylyl Glycol	Conditionneur pour la peau. A aussi des propriétés de conservation.	
Cetearyl Alcohol	Alcool gras à base de plantes qui aide à créer l'émulsion huile dans l'eau et améliore la de la lotion tartinabilité.	0,1-1
Glyceryl Caprylate	Humectant. Possède également des propriétés de conservation	0,1-1
Sodium Stearoyl Lactylate	Émulsifiant doux naturel qui aide à créer l'émulsion huile dans l'eau.	0,1-1
Sodium Hyaluronate	Polysaccharide qui fait partie de la matrice intracellulaire de la peau. Appuie le renouvellement de la peau dans les zones de la peau irritée.	0,1-1
Tocopherol (Vitamin E)	Antioxydant et hydratant pour prévenir la déshydratation de la peau.	0,1-1
Potassium Sorbate	Moyen de conservation naturel qui prolonge la durée de vie du produit.	
Dipropylene Glycol	Solvant pour la conservation.	<0,1

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

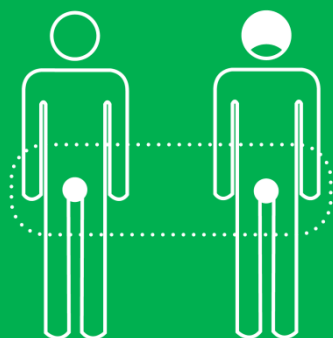

Nettoyez la zone souillée du périnée avec suffisamment de lingettes de toilettes et d'avant vers l'arrière.

Swash® Perineum⁺ lingettes sont destinées à nettoyer, soigner, protéger et aider à restaurer la peau.

Assurez-vous que la peau soit sèche avant que le matériel d'incontinence et/ou sous-vêtements soit à nouveau placés.

Si vous le souhaitez le paquet peut être réchauffé au micro-ondes.

Vérifiez la température avant utilisation.

Chaque paquet est utilisé que pour une seule personne.

Évitez tout contact avec les yeux.

Dans le cas de rougeurs persistantes et lésions sévères chez le patient (pas de peau irritée mais bien une peau abîmée), c'est nécessaire de consulter un spécialiste soins de plaies, dermatologue, infirmière en dermatologie, médecin de famille ou gériatre.

Les lingettes sont jetables et chaque paquet doit être lié à un seul patient.

Uniquement conçu pour usage externe.

Nous conseillons d'utiliser un paquet ouvert dans les 48 heures.

Ne pas jeter dans les toilettes.

RÉSULTATS DES TESTS

Tests Irritation de la peau

Les résultats montrent que la lotion de Swash® Perineum⁺ lingettes ne provoque aucune irritations sur la peau. Il n'y a eu par ailleurs aucun signe d'oedème ou de rougeur de la peau pendant ou après le test. Et il n'y a aucune indication qu'il provoque des réactions allergiques.