



SWASH[®] PERINEUM⁺ WIPES – PARFÜMFREI

ALLGEMEINE INFORMATION

Artikelnummer	Ko4540-8
Basic UDI-DI	871712793INCONTINENCENG
UDI-DI	o8717127938186
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Für den Einsatz in der perinealen Pflege inkontinenter Patienten als Maßnahme zur Prävention von Hautschäden im Zusammenhang mit der Feuchtigkeitsexposition von Urin und Stuhl (IAD) oder als Maßnahme zur frühzeitigen Behandlung solcher Hautschäden (IAD) vorgesehen.
Paketinhalt	8 Waschtücher
Kartoninhalt	40 Packungen
Hersteller	Arion Manufacturing B.V. – Niederlande Rutherford 11, 6422 RE Heerlen
Ausstellungsdatum	04/2021
Überarbeitungsdatum	09/2022
Version	V2

PRODUKTINFORMATION

Produktart	Medizinprodukt Klasse 1 (Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745)
Zusammensetzung des Tuches	Polyester & Lyocell
Stoff-Art	Spunlace
Dicke des Tuches	ca. 82 GSM
Gewicht Karton	ca. 10.000 g
Netto-Abfallgewicht Tuch	ca. 35 g
Netto-Abfallgewicht Folie	ca. 5 g
pH-Wert	5 – 6
Größe des Tuches	20 cm x 25 cm
Paket-Abmessungen	10,5 cm x 25,5 cm

INHALTSSTOFFE LOTION


FUNKTION

KONZENTRATION %

Aqua	Dient als Lösungsmittel, in dem die übrigen Inhaltsstoffe gelöst werden.	75-100
Dimethicone	Wasseranziehender, filmbildender Wirkstoff, der die Austrocknung der Haut reduziert, indem er die Verdunstung von Wasser verhindert und als Hautschutzmittel wirkt. Wird auch als schaumhemmender Inhaltsstoff verwendet.	3
Propylene Glycol	Lösungsmittel, das auch als wasseranziehender Bestandteil wirkt und so die Austrocknung der Haut reduziert.	1-5
Magnesium Aluminum Silicate	Natürlicher Bentonit-Ton (Tonmineral), der dabei unterstützt, die Öl-in-Wasser-Emulsion zu stabilisieren	1-5
Glycerine	Natürlicher Feuchtigkeitsspender, die den Hautzellen Wasser für eine bessere Hydratation der Haut zur Verfügung stellt.	1-5

Caprylic / Capric Triglyceride	Natürlich vorkommende Fettsäuren, die die Haut weicher machen	O,1-1
Lauryl Glucoside	Sehr milder Hautreiniger aus pflanzlicher Herkunft	O,1-1
Sodium Lauroyl Lactylate	Natürlicher milder Emulgator, der zur Bildung der Öl-in-Wasser-Emulsion beiträgt.	O,1-1
Polyacrylate Crosspolymer-11	Hydrogel bildendes Verdickungsmittel für Öl-in-Wasser-Emulsionen	O,1-1
Glyceryl Stearate	Emulgator, der dabei hilft, die Haut geschmeidig zu machen.	O,1-1
Caprylyl Glycol	verwenden	O,1-1
Cetearyl Alcohol	Pflanzlicher Fettalkohol, der die Emulsionsbildung unterstützt und die Streichfähigkeit der Lotion auf der Haut verbessert.	O,1-1
Glyceryl Caprylate	Dient zum Befeuchten der Haut. Zusätzlich verlängert der Bestandteil die Haltbarkeit des Produkts, wie ein Konservierungsstoff.	O,1-1
Sodium Stearoyl Lactylate	Natürlicher milder Emulgator, der zur Bildung der Öl-in-Wasser-Emulsion beiträgt.	O,1-1
Sodium Hyaluronate	Körpereigene im Bindegewebe vorkommende Substanz (Polysaccharid), die die Regeneration der irritierten Haut unterstützt.	O,1-1
Tocopherol (Vitamin E)	Verlängert die Haltbarkeit des Produkts, indem es die Oxidation an der Luft verhindert. Außerdem wird dieser Stoff als Feuchtigkeitsmittel eingesetzt, um Trockenheit von Haut und Haaren zu vermeiden.	O,1-1
Potassium Sorbate	Natürliches Konservierungsmittel. Funktioniert auch als pH-Stabilisator	O,1-1
Dipropylene Glycol	Lösungsmittel für das Konservierungssystem.	<O,1

ANWENDUNG

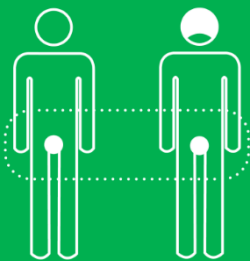

Reinigen Sie den verschmutzten Dammbereich mit ausreichend vielen Tüchern von vorne nach hinten.

Mit Swash® Perinium⁺ Wipes wird die Haut gereinigt, gepflegt, vor Feuchtigkeit geschützt und bei der Regeneration unterstützt.

Sorgen Sie dafür, dass die Haut trocken ist vor dem neuen Anziehen von Inkontinenzmaterialien und/oder Unterwäsche.

Falls erforderlich, kann die Swash®-Packung vor dem Gebrauch erwärmt werden.

Die Temperatur sollte vor dem Gebrauch der erwärmten Waschtücher überprüft werden.

Die Packung ist personengebunden.

Vermeiden Sie den Kontakt dieses Produktes mit den Augen.

Bei anhaltender Rötung und ernsthafter Hautverletzung bei dem Pflegebedürftigen (nicht irritierte, sondern ernsthaft offene Haut) muss ein Wundspezialist, Dermatologe oder ein Hausarzt konsultiert werden.

Einwegprodukt.

Nur zur externen Anwendung geeignet.

Eine geöffnete Packung ist nur innerhalb 48 Stunden verwendbar.

Entsorgen Sie die Waschtücher nicht in der Toilette.

HAUTVERTRÄGLICHKEIT

Test auf Hautreizung

Ergebnisse:

- keine Irritationen auf der Haut
- kein Ödem auf der Haut und keine Hautrötung während und nach dem Test
- keine Indikation, dass eine allergische Hautreaktion verursacht werden könnte